

## Oxivir Sporicide

Bredspektrigt Väteperoxidbaserat Rengörings- & Desinfektionsmedel för icke invasiva medicinska instrument och för ej porösa hårda ytor.

### Beskrivning

Diversey Care Oxivir Sporicide är ett bruksfärdigt rengörings- och desinfektionsmedel som är effektivt mot *Clostridium difficile* och *Bacillus subtilis*. Baserad på Diversey Cares patenterade Accelerated Hydrogen Peroxide (AHP) formulering kan Oxivir Sporicide användas på icke invasiva medicinska instrument och hårda, ej porösa ytor.

### Produktegenskaper

- Effektiv mot *Clostridium difficile* på 1 minut\*
- Tuberkulocid, Baktericid, Spor-, virus- och svampavdödande på 1 minut\*
- Användarvänlig och säker att använda på olika material jämfört med andra sporavdödande produkter
- Effektivt rengöringsmedel
- Utan färg eller parfym
- Produkten bryts ned till vatten och syre – Inga aktiva rester på rengjord yta
- Innehåller inte klor eller alkohol

### Produktfördelar

- Utmärkt gensvar vid utbrott av *Clostridium Difficile*
- Produkten avdödar med ett brett spektrum alla andra klasser av patogener och ger den högsta möjliga säkerheten för patienter och personal
- Kort kontakttid håller ytan fuktig under verkningstiden vilket säkerställer desinficerande effekt
- Ingen eftersköljning nödvändig
- Orsakar inte irritation i luftvägarna
- Utmärkt att använda för alla högriskområden inom sjukvård såsom Operationssalar, Intensivvårds- Neonantalintensivvårdsavdelning och Patientrum
- Skummunestycke möjliggör effektiv applicering

### Bruksanvisning

#### Applikation


Skumsprayrengöring och desinfektion:

1. Avlägsna lös smuts.
2. Spraya på torkduken och torka ytan eller spraya direkt på ytan som ska rengöras.
3. Säkerställ att ytan förblir fuktad under kontakttiden, låt ytan lufttorka.

**Viktigt:** Kombinera inte med andra produkter. Använd inte produkten på ytor känsliga för vatten eller syra.

\* Vid användning som slutlig desinficering efter tidigare rengöring.

CE

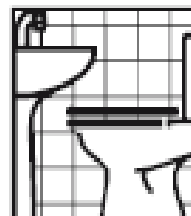

## Teknisk information

Utseende:	Klar, färglös vätska
Relativ densitet [20° C]:	1.03265
pH brukslösning:	2.7 ± 0.3
Hållbarhet:	2 år i oöppnad behållare
Doft:	Neutral

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

## Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om användning och hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. Förvaras i sluten originalförpackning. Undvik extrema temperaturer. Reagerar med oxiderbara ämnen.

## Att beakta

Diversey Oxivir Sporicide är lämplig att använda på alla tänkbara ytor förutsatt att man följer rekommenderade anvisningar.

## Miljöinformation

Tensiderna i produkten är lätt nedbrytbara enligt tvätt- och rengöringsmedelsförordningen, EC 648/2004.

## Mikrobiologisk information

Oxivir Sporicide är godkänd enligt: EN13727, EN13624, EN13697, EN14476, EN13704, EN14348, EN16615

Krav	Kontaktid/förhållande		
	EN test	Smutsig yta	Ren yta
<i>Bateriocid</i>	EN13727	30 sek	
	EN13697	1 min	
	EN16615	1 min	
<i>Jästavdödande</i>	EN13624	1 min	
	EN13697	1 min	
	EN16615	1 min	
<i>Svampavdödande</i>	EN13624	6 min	
	EN13697	5 min	
<i>Virusavdödande</i>	EN14476	1 min	
<i>Sporavdödande (C. difficile)</i>	EN13704	3 min	1 min
<i>Sporavdödande (B. subtilis)</i>		30 min	15 min
<i>Tuberkulocida</i>	EN14348	10 min	
<i>Mykobaktericida</i>	EN14348	5 min	

## Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp
100934091	6x750 ml	Skumsprayflaska