



Liv Liv Des +72 Wipes

Produktinformation

Singelförpackad ytdesinfektionsservett (185*215 mm) med 10 ml ytdesinfektionsmedel. Avsedd att användas för desinfektion av rena och/eller lätt smutsade släta ytor på icke-invasiva medicintekniska produkter. Produkten kan även användas på allmänna släta ytor motsvarande ca 1 m² som tål alkohol. Levereras i en pappersstört om 150 st servetter.

Endast för professionell användning, av hälsovårdspersonal (medicinskt ändamål) och professionella lokalvårdare (icke-medicinskt ändamål).

Aktiv substans: etanol 600 g/kg, isopropanol 60 g/kg.
Innehåller 75 vol% etanol med en tillsats av tensid.

Bruksanvisning

För icke-invasiva medicintekniska produkter, följ alltid tillverkarens bruksanvisning.

Öppna servetten genom att vrida av vid perforeringen. Ta ut och veckla ut servetten och bearbeta ytan. Låt ytan vara fuktig under hela verkningstiden och därefter lufttorkas. Vid större mängd föroreningar av blod eller andra kroppsvätskor torkas dessa först upp med absorberande material och ytan rengöres innan desinfektion. Endast för engångsbruk.

Produktdata

Artikelnummer	Benämning	Antal/kartong	EAN
17330150	Liv Des +72 Wipes 150-Pack	150st/kartong	7391443173394

UNSPSC: 42281604





CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa, NB 3033.

Mikrobiologisk effekt:

Verkningstid:

Bactericidal EN13727:	5min
Bactericidal EN13697:	2min
Bactericidal EN16615:	5min
Yeasticidal EN13624:	5min
Yeasticidal EN13697:	2min
Yeasticidal EN16615:	5min
Fungicidal EN13624:	5min
Virucidal EN14476	
Höljeförsedda virus:	1 min
Murine Norovirus:	5min
Adenovirus:	5min

Användarsäkerhet

Använd Liv Des +72 Wipes på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

För ytterligare teknisk specifikation, se säkerhetsdatablad.

- Allvarliga incidenter med Liv Des +72 wipes ska anmälas till info@clemondo.se samt till Läkemedelsverket.
- Produkten ska inte användas på ytor eller utrustning som är känsliga för produkten, t.ex. material som kan korroderas eller skadas av alkohol.
- Personer med allergier eller känslighet mot vissa kemikalier i desinfektionsmedel kan få hudutslag, andningsproblem eller andra allergiska reaktioner. Använd skyddsutrustning vid behov.
- Kan vara mindre effektiv i närvaro av organiskt material som smuts och kroppsvätskor. Förbehandling med rengöring kan vara nödvändigt.

Förpackningsmaterial

Servett	Fiberduk (Nonwoven PES), Viskos
Primärförpackning	Folie - Papper, Polyeten (PE) Aluminium, Surlyn
Sekundärförpackning	Kartong - Wellpapp
Transportförpackning	Kartong - Wellpapp











Hantering

Förvaras i rumstemperatur i försluten originalförpackning och oåtkomligt för barn. 3 års hållbarhet i oöppnad förpackning, 12 månader efter öppnande.

Produkten innehåller brandfarliga ämnen. Förvara och använd produkten långt ifrån värmekällor, gnistor, öppen eld eller heta ytor. Tomma emballage ska sorteras som "förpackning av plast". Ej helt tomma emballage ska sorteras som "farligt avfall".





Information/Symbol Description (to be included in IFU)	Symbol	Guidance for use (additional text required/explanations)
Manufacturer (Legal Manufacturer) <i>Shall include physical address</i>		Clemondo AB Makadamgatan 16 254 64 Helsingborg Tel: 042-25 67 00 www.clemondo.se info@clemondo.se
CE mark in accordance with 2017/745 Medical Device Regulations		Yes, no NB number
Medical device		N/A
Catalogue number (=Product/Model number used to identify product to purchasers)		N/A
Product name	N/A	N/A
Intended purpose	N/A	
LOT		N/A
Unique Device Identifier		N/A
Consult instructions for use		N/A
Expiry date		N/A
Warnings/precautions		
	 Fara	Mycket brandfarlig vätska och ånga
	 Fara	Behållaren ska vara väl tillsluten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Sköj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning. Håll utom räckhåll för barn.