



REGELEFTERLEVNAD DESINFEKTION AV MILJÖN

Incidin™ OxyFoam S

SPORICIDALT RENGÖRINGS- OCH DESINFEKTIONSMEDEL I FÄRDIG BRUKSLÖSNING

Den avancerade sammansättningen i Incidin™ OxyFoam S ger fördelarna av en patenterad* väteperoxidlösning med ett brett effektspektrum.

Effektiv mot en stor mängd patogener och efterlämnar inga aktiva rester tack vare snabb avdunstning.

- Den aktiva beståndsdel bryts ner till vatten och syre
- Sporicid och virucid verkan
- Utmärkt materialkompatibilitet

Incidin OxyFoam S är godkänd i EU enligt BPR (Biocide Product Regulation 528/2012)

- Passerat omfattande toxikologiska, ekotoxikologiska- och kriterier för bedömning av exponering under BPR
- Uppfyller högsta säkerhetsstandarder, säkerställer en hög skyddsnivå för människors hälsa och för miljön
- Levererar hållbar efterlevnad



*Europeisk Patent EP1987121

Incidin™ OxyFoam S

SPORICIDALT RENGÖRINGS- OCH DESINFEKTIONSMEDEL I FÄRDIG BRUKSLÖSNING

EFFEKTIV

- Brett effektivitetsspektrum

SÄKER

- Den aktiva beståndsdelens bryts ner till vatten och syre.
- Utmärkt materialkompatibilitet
- Passerat omfattande BPR-bedömning

PRAKTISK

- Rengör och desinficerar
- Färdig att använda

MIKROBIOLOGISKA EGENSKAPER FÖR TILLÄMPNING PÅ MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

EFFEKT OUTSPÄDD	KONTAKTTID
Desinfektion av ytor med mekanisk verkan enligt VAH metoden 2015	
Baktericid, jästicid	5 min*
Fungicid	5 min*
Mykobaktericid	15 min*
Bactericid enligt EN 13727 (1 min) / EN 16615 (1 min*)	1 min*
Jästicid enligt EN 13624 (1 min) / EN 16615 (1 min*)	1 min*
Fungicid enligt EN 13624 (5 min) / EN 16615 (metod) (5 min*)	5 min*
Tuberkulocid enligt EN 14348 (5 min) / EN 16615 (metod) (5 min*)	5 min*
Mykobaktericid enligt EN 14348 (5 min) / EN 16615 (metod) (5 min*)	5 min*
Effektivitet mot höljebärande virus enligt EN 14476	30 sek*
Virucid med begränsat spektrum enligt EN 14476 (Adenovirus - 30 sek, Norovirus - 1 min** / 15 min*)	1 min** / 15 min*
Virucid enligt EN 14476	10 min** / 30 min*
Sporicid mot <i>C. difficile</i> enligt EN 17126	60 min**
Sporicid mot <i>C. difficile</i> enligt EN 16615 (metod) enl. CEN TC216 prWI Oct 2020 / VAH method 19	15 min**
Sporicid enligt EN 17126	60 min**
Effektiv mot höljeförsedda virus enl. RKI rekommendation 10/2022	15 sek***
Virucid med begränsat spektrum	30 min***
Adenovirus	30 sek***
Polyomavirus SV40	30 sek***
Rotavirus	15 sek***

* smutsiga förhållanden ** rena förhållanden *** DVV 2015 (suspensions test)

MIKROBIOLOGISKA EGENSKAPER FÖR BIOCID TILLÄMPNING

EFFEKT OUTSPÄDD	KONTAKTTID
Baktericid, jästicid	1 min**
Fungi och Mykobakterier	5 min**
Bakteriesporer	30 min* / 60 min**
Clostridium difficile sporer	5 min*
Virus	30 min**

* rena förhållanden ** smutsiga förhållanden

MEDICINTEKNISK UTRUSTNING OCH SÄKER ANVÄNDNING AV BIOCIDER

V.g läs etikett- och produktinformationen.

TILLÄMPNINGSSOMRÅDE



Medicintekniska produkter: Sporicidalt rengörings- och desinfektionsmedel i färdig brukslösning för invasiva och icke-invasiva medicintekniska produkter.

Biocider: PT02 - Desinfektion av ytor som inte kommer i kontakt med livsmedel, i hälso- och sjukvård
- genom användning av sprayflaskan och ren torkduk/trasa
- genom användning av hink och ren engångstrasa/torkduk och genom att moppa med mopp och hink.

BRUKSANVISNING

Medicintekniska produkter:
750ml: Spraya på ytan från ca 30 cm avstånd, vät ytan så att den blir helt blöt.

5L: Applicera produkten så att ytan blir helt blöt.

Gäller alla förpackningsstorlekar: Torka av ytan med en ren trasa/torkduk och låt ytan torka. Alternativt applicera produkten på en ren torkduk, våttorka ytan och låt den torka. Skölj inte. Respektera den angivna kontakttiden och villkoren för den antimikrobiella aktiviteten. Om den används under rena förhållanden, rengör ytan före (använd ny torkduk/mopp för varje steg). Användning av en rengörings- och desinfektionsprodukt ersätter inte regelbunden rengöring. Använd inte på ytor som är känsliga för oxidationsmedel såsom marmor, koppar eller mässing. Vid upparbetning av medicintekniska produkter ska du alltid följa tillverkarens bruksanvisning, inklusive materialkompatibilitet. Terminaldesinfektion av halvkritiska medicintekniska produkter (dvs sonder och TEE-sonder): Om nedsänkning inte är möjligt, desinficera utrustningen genom att torka av den enligt beskrivningen ovan. Skölj noggrant med vatten av dricksvattenkvalitet i detta fall efter att kontakttiden har löpt ut.

Biocider:
Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla instruktioner. Produkten ska appliceras på en torr yta. Vät ytan noggrant. Skölj inte efter användning. Använd inte på ytor som är känsliga för oxidationsmedel såsom marmor, koppar eller mässing. Produkten är avsedd för rengöring och desinfektion i ett steg. Vid användning under rena förhållanden: rengör ytan före.

Användning av sprayflaskan och ren torkduk/trasa: För optimalt resultat, håll flaskan upprätt och spraya från ett avstånd på 30 cm. Spraya produkten på en ren torkduk och torka av små ytor som arbetsytor och utrustning eller spraya produkten på ytan och torka sedan av ytan med en ren trasa och låt torka. Stäng alltid munstycket efter användning. Använda våtservetter kasseras i en sluten behållare.

Användning av ren trasa/torkduk eller golvmopp och hink: Håll produkten i en ren hink och fördela över ytan genom att använda en trasa/torkduk eller över golvet med golvmopp. Låt lufttorka. Använda torkdukar kasseras i en sluten behållare.

INGREDIENSER

100g innehåller följande aktiva ingrediens:
1.5g väteperoxid (CAS 7722-84-1)

FÖRVARING

Produkten ska förvaras i originalförpackningen mellan 0°C och 25°C på en sval, torr plats utan direkt solljus. Hållbarhet efter första öppnandet: Sista utgångsdatum.



ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Incidin™ OxyFoam S

INFORMATION OM FÖRPACKNING OCH BESTÄLLNING

PRODUKT	FÖRPACKNINGSENHET	BESTÄLLNINGSKOD
Incidin™ OxyFoam S	6 x 750ml	3115810
Incidin™ OxyFoam S	2 x 5L	3115900
Avtappningskran (DIN 51) för 5 litersbehållare	1	10033873



FÖRORDNINGEN OM BIOCIDPRODUKTER/ BIOCIDAL PRODUCTS REGULATION (BPR), FÖRORDNING (EU) 528/2012:

BPR ersatte Biocidal Product Directive (BPD) den 1 september 2013 som den lagstiftning som ansvarar för utsläppande av verksamma biocidämnen och biocidprodukter på den europeiska marknaden.

Som förordning blev den juridiskt bindande för länder som faller inom ramen för EU:s regelverk – alla EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz (European Free Trade Associations länder).

Förordningen om biocidprodukter erbjuder ett harmoniserat, centraliserat godkännandealternativ för biocidprodukter på europeisk nivå jämfört med BPD. Förordningen om biocidprodukter är utformad för att kontrollera användningen av och utsläppandet på marknaden av biocidprodukter. Det innebär en bedömning av en biocidprodukts effektivitet, toxicitet och risken vid användning. Dessutom krävs tillförlitliga uppgifter för att bevisa biocidproduktens effektivitet och säkerhet samt en förteckning över godkända verksamma biocidämnen och leverantörer.

EU:S REGISTRERINGSNUMMER FÖR BIOCID

EU-0024303-0006 1-5

ECOLAB AB
Glasfibergatan 10,
125 24 Älvsjö,
Sverige



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB
PROTECTING WHAT'S VITAL™